



LIFEWAVE®

energy enhancer

說明書



## エナハンサ

### 使用上の注意

#### <重要な基本的注意>

1. 医師の治療を受けている方や下記に該当する方は専門家とご相談の上で使用ください。
  - (1) 皮膚に創傷や感染症がある方。創傷面の悪化や二次感染の可能性があります。
  - (2) 妊娠中または授乳中の方。
  - (3) 心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器を装着している方。
  - (4) 他の治療機器をご使用の方。
2. 足裏等、強い圧力がかかる箇所への使用時は粘着テープやパッドによる滑りにご注意ください。
3. パッチは12時間を目安にはがしてください。長時間の皮膚への刺激を避けるためです。
4. 身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
5. 貼付部位に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れたときは直ちに使用を中止してください。
6. 適宜、水分の補給をしてください。鍼灸やマッサージ後は血流やリンパの流れがよくなるといわれていますので、適切に水分を摂るようにしてください。

#### <不具合・有害事象>

1. その他の不具合  
包装破損、汚染
2. その他の有害事象  
発疹、発赤、かゆみ、皮膚症状

#### • その他の注意

医師の治療を受けている人は医師に相談の上で使用ください。  
禁忌は確認されていませんが、ペースメーカーを装着している方は医療関係者にご相談ください。

## 使用方法

- ・ パッチを清潔で乾いた肌に貼ってください。
- ・ パッチは最大12時間使用が可能です。
- ・ 使用したパッチは再利用せず捨ててください。
- ・ パッチ使用中は十分に水分を補給してください。

## 貼付方法



### ステップ 1

皮膚を洗浄します。  
その後、こりのある箇所を探します。



### ステップ 2

本体の剥離紙をはがします。



### ステップ 3

こりのある箇所に貼付します。

## 貼付位置 <使用例>

下図にあるいずれかの部位に、パッチを貼ってください。  
白色のパッチを体の右側に、茶色のパッチを体の左側に貼ってください。



### 貼付位置 1

鎖骨より下約2.5センチの肩の内側です。



### 貼付位置 2

手首の内側、手の付け根から指3～4本分の位置です。



### 貼付位置 3

膝頭から指4本分下の方向へ、そして膝から指1本分外側へ移動した窪みの部分です。



### 貼付位置 4

足首の内側、距骨の真後ろにある窪みの部分です。



### 貼付位置 5

手首の外側、手の付け根から指3本分の位置です。





LifeWave合同会社  
東京都新宿区西新宿3-2-9  
TEL: 050-3198-1108 / 03-5669-0947  
FAX: 03-5669-0957  
E-mail: [customerservicejp@lifewave.com](mailto:customerservicejp@lifewave.com)