

LIFEWAVE®

Y-age
glutathione

Y-age
carnosine

Y-age
deon

説明書

使用上の注意

<重要な基本的注意>

1. 医師の治療を受けている方や下記に該当する方は専門家とご相談の上で使用ください。
 - (1) 皮膚に創傷や感染症がある方。創傷面の悪化や二次感染の可能性があります。
 - (2) 妊娠中または授乳中の方。
 - (3) 心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器を装着している方。
 - (4) 他の治療機器をご使用の方。
2. 足裏等、強い圧力がかかる箇所への使用時は粘着テープやパッドによる滑りにご注意ください。
3. パッチは12時間を目安にはがしてください。長時間の皮膚への刺激を避けるためです。
4. 身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
5. 貼付部位に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れたときは直ちに使用を中止してください。
6. 適宜、水分の補給をしてください。鍼灸やマッサージ後は血流やリンパの流れがよくなるといわれていますので、適切に水分を摂るようにしてください。

<不具合・有害事象>

1. その他の不具合
包装破損、汚染
2. その他の有害事象
発疹、発赤、かゆみ、皮膚症状

• その他の注意

医師の治療を受けている人は医師に相談の上で使用ください。
禁忌は確認されていませんが、ペースメーカーを装着している方は医療関係者にご相談ください。

使用方法

- ・ パッチを清潔で乾いた肌に貼ってください。
- ・ パッチは最大12時間使用が可能です。
- ・ 使用したパッチは再利用せず捨ててください。
- ・ パッチ使用中は十分に水分を補給してください。

貼付方法



ステップ 1

皮膚を洗淨します。
その後、こりのある箇所を探します。



ステップ 2

本体の剥離紙をはがします。



ステップ 3

こりのある箇所に貼付します。

貼付位置<使用例>

下図にあるいずれかの部位に、パッチを週5日から7日貼ってください。



貼付位置 1

おへそから指3本分下の位置です。



貼付位置 2

鎖骨の中心に位置する喉の付け根の窪み部分です。



貼付位置 3

右足の甲、親指と人差し指の骨の間です。



貼付位置 4

右手の親指から手首への線上にある右手首の付け根の窪み部分です。



貼付位置 5

右足の距骨内側から指4本分上の方向に移動した脛骨の上です。

使用方法

- ・ パッチを清潔で乾いた肌に貼ってください。
- ・ パッチは最大12時間使用が可能です。
- ・ 使用したパッチは再利用せず捨ててください。
- ・ パッチ使用中は十分に水分を補給してください。

貼付方法



ステップ 1

皮膚を洗淨します。
その後、こりのある箇所を探します。



ステップ 2

本体の剥離紙をはがします。



ステップ 3

こりのある箇所に貼付します。

貼付位置<使用例>

下図にあるいずれかの部位に、パッチを週1日から3日貼ってください。



貼付位置 1

胸の中心、胸骨の上です。



貼付位置 2

首の後ろ側、あごを下げたときに脊椎骨が突き出る位置です。



貼付位置 3

右手の甲、人差し指の骨の上です。



貼付位置 4

背骨の底部、尾骨の真上です。



貼付位置 5

右手首の内側の付け根部、真ん中から指1本分小指の方向へ移動した位置です。

Yエイジ イーオン

使用方法

- ・ パッチを清潔で乾いた肌に貼ってください。
- ・ パッチは最大12時間使用が可能です。
- ・ 使用したパッチは再利用せず捨ててください。
- ・ パッチ使用中は十分に水分を補給してください。

貼付方法



ステップ 1

皮膚を洗淨します。
その後、こりのある箇所を探します。



ステップ 2

本体の剥離紙をはがします。



ステップ 3

こりのある箇所に貼付します。

貼付位置<使用例>

下図にあるいずれかの部位に、パッチを週5日から7日貼ってください。



貼付位置 1

おへそから指3本分下の位置です。



貼付位置 2

首の後ろ側、あごを下げたときに脊椎骨が突き出る位置です。



貼付位置 3

足首の内側、距骨の真後ろにある窪みの部分です。



貼付位置 4

右手の甲、人差し指の骨の上です。



貼付位置 5

右足の甲、親指と人差し指の骨の間です。



LifeWave合同会社
東京都新宿区西新宿3-2-9
TEL: 050-3198-1108 / 03-5669-0947
FAX: 03-5669-0957
E-mail: customerservicejp@lifewave.com